

FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CADDY (ROTE BESCHRIFTUNGEN)

Aufzugsanleitung Sitzschonbezug

1

1. zum Abnehmen der Kopfstütze Knopf drücken und Kopfstütze nach oben wegziehen



2

1. **Bebänderung** hinter die Sitzlehne führen
2. **Bebänderung** über die Armlehne (falls vorhanden) führen



FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CADDY (ROTE BESCHRIFTUNGEN)

Aufzugsanleitung

Sitzschonbezug

3

1. Sitzbezug über die Lehne stülpen
2. Sitzflächenbezug über das Sitzteil stülpen
(Beim VW Caddy Gummizug unter dem Sitz herführen)



4

1. Sitzflächenbezug hinter die Sitzverkleidung führen
(falls vorhanden)



FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CADDY (ROTE BESCHRIFTUNGEN)

Aufzugsanleitung Sitzschonbezug

5

1. **Zusatzband** unter dem Verstellhebel her nach hinten führen und dort an die **Bebänderung** ankletten



6

1. **die beiden kurzen Gummischlaufen (Pfeil)** durch die Sitzfuge stecken (zwischen Sitzteil und Lehne) und hinterm Sitz um den quer gespannten Gummizug kletten (bei VW Caddy)
2. **Kopfstütze** vorsichtig durch die im Sitzbezug vorhandenen Löcher in die Sitzlehne schieben und den Kopfstützenbezug über die Kopfstütze stülpen



FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CADDY (ROTE BESCHRIFTUNGEN)

Aufzugsanleitung

Sitzschonbezug



Waschanleitung

Zum Abnehmen des Sitzschonbezuges sind die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.

Waschen

Für eine desinfizierende Reinigung empfehlen wir, die Bezüge einmal wöchentlich, bei der normalen Regeldesinfektion des Fahrzeuges, mit mindestens 60° zu waschen.

Nach Infektionsfahrten sind die Sitzschonbezüge generell bei 60° und einem Desinfektionsprogramm zu waschen.

Wir empfehlen, die Sitzschonbezüge nur bei sichtbarer starker Kontamination durch z. B. Blut, Urin etc. bei 95° zu waschen.

Trocknen

Die Sitzschonbezüge können an der Luft getrocknet werden, aber auch bei jedem normalen Trockenprogramm in Ihrem Trockner.