

## Waschempfehlung:

### Reinigung unserer Schonbezüge:

Für eine desinfizierende Reinigung empfehlen wir die Bezüge einmal wöchentlich, im Zuge der Regeldesinfektion des Fahrzeuges, mit mindestens 60° zu waschen.

(Für eine desinfizierende Reinigung ist eine Waschtemperatur von mindestens 60° C erforderlich)

Nach Infektionsfahrten sind die Sitzschonbezüge generell bei 60° und einem Desinfektionsprogramm zu waschen.

Wir empfehlen die Sitzschonbezüge nur bei sichtbarer starker Kontamination durch z.B. Blut, Urin etc. bei 95° zu Waschen.

## Waschhinweise:

1. Nicht geeignet für Bleichverfahren
2. Reinigung mit Perchlorethylen möglich
3. Bügeln mit hoher Temperatur möglich

### Trocknen unserer Schonbezüge:

- Die Bezüge können im Trockner und an der Luft getrocknet werden.
- Bei Maschinentrocknung normale Temperatur wählen